

Gebrauchsanweisung Toilettenstuhl „TSF“



Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,
wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines technisch ausgereiften und nach dem neusten Stand der Technik konstruierten Produktes unseres Hauses. Der Toilettenstuhl ist mit vier 5 Zoll Rädern ausgestattet und ist ggf. in Anwesenheit einer Hilfsperson zu benutzen.

Die Gebrauchsanweisung beschreibt die Vorbereitung, Bedienung, Nutzung, Wartung und Pflege des Produktes. Sie dient somit dem Benutzer sowie dem Betreuungspersonal als Handlungsgrundlage für sichere und gefahrlose Nutzung Ihres Toilettenstuhles. Um die Nutzung sinnvoll auszuschöpfen und gefährliche Situationen zu vermeiden, lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch und bewahren Sie diese griffbereit auf.

Lieferumfang

Der Toilettenstuhl wird im Karton verpackt geliefert. Bewahren Sie den Karton nach Möglichkeit auf, da er zur evtl. späteren Einlagerung dient.

Nach Erhalt der Ware überprüfen Sie bitte umgehend auf Vollständigkeit und Unversehrtheit des Produktes.

- Verpackungs- und Transportkarton
- Gestell mit montierter Bereifung
- 1 Paar Fußstützen
- Rückenlehne mit Armlehnen
- Sitzbrille und Abdeckpolster
- 1 Eimer mit Deckel

Gebrauchsanweisung

Beschreibung des TSF



Indikation

Toilettenrollstühle sind dann erforderlich, wenn das Benutzen oder Erreichen der Toilette aufgrund der Behinderung nicht mehr möglich ist. Der TSF kann zusätzlich als Sitzgelegenheit und Zimmerrollstuhl, wenn von einer Begleitperson geschoben genutzt werden

Kontraindikation

Die Verwendung des Toilettenstuhl ist nicht angezeigt bei

- Wahrnehmungsstörungen
- starken Gleichgewichtsstörungen
- Sitzunfähigkeit

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung vollständig durch. Vor der ersten Benutzung empfehlen wir den Umgang mit Ihrem Toilettenstuhl auf ebenem und bekanntem Gelände zu üben um riskante Situationen zu vermeiden.

- Vergewissern Sie sich vor jeder Anwendung, dass ihr TSF unversehrt ist und alle verstellbaren Teile ordnungsgemäß befestigt sind und die Bremsen funktionstüchtig sind.
- Achten Sie darauf, dass der Toilettenstuhl stets vor dem Wegrollen durch Betätigung der Feststellbremse gesichert ist.
- Der Toilettenstuhl ist nur für den Transport einer Person geeignet. Der Transport von Lasten oder mehreren Personen wird als Zweckentfremdung betrachtet.
- Die Benutzung darf ausschließlich im Innenraum und auf festem Untergrund erfolgen.
- Das Kipprisiko kann bei Gleichgewichtsverlagerung durch Körperbewegungen oder Beladung vergrößert werden.
- Zur Überwindung von Hindernissen verwenden Sie bitte unbedingt Auffahrampen.
- Stellen Sie sich nie beim Ein- und Aussteigen auf die Fußplatten
- Verwenden Sie keine Hochdruckreinigungsgeräte oder scharfe, ätzende Chemikalien zur Reinigung.


Sitzfläche montieren

Betätigen zuerst die Feststellbremsen
Legen Sie die Sitzfläche von oben auf den Rahmen, so wie auf der Abbildung dargestellt
Die Sitzfläche muss so positioniert werden, dass alle Kontaktfläche auf dem Rahmen liegen
Vergewissern Sie sich, dass die Sitzfläche stabil und sicher auf dem Rahmen liegt



Rückenlehne montieren

Drehen Sie zuerst beide Feststellschrauben am Rahmen heraus
Schieben Sie die Rohre der Rückenlehne in den Rahmen
Ziehen Sie die Feststellschrauben wieder fest an
Bringen Sie die Armlehnen in die waagerechte Position

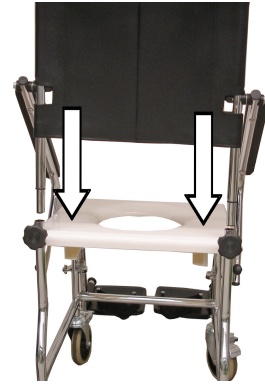


Höhenverstellung der Fußstützen

Der TSF ist mit vier 5-Zoll Schwenkrollen ausgestattet, wobei zwei Rollen mit Totalfeststeller ausgeführt sind. D.h. nach Betätigung sind die Rollen gebremst und gegen verdrehen gesperrt. Betätigen Sie die Bremse durch einen Tritt auf die Feststellwippe



Feststellbremsen

Der TSF ist mit vier 5-Zoll Schwenkrollen ausgestattet, wobei zwei Rollen mit Totalfeststeller ausgeführt sind. D.h. nach Betätigung sind die Rollen gebremst und gegen verdrehen gesperrt. Betätigen Sie die Bremse durch einen Tritt auf die Feststellwippe
Zum Lösen der Bremse treten Sie auf den kleinen Wipphebel
Der TSF ist nun wieder bewegbar

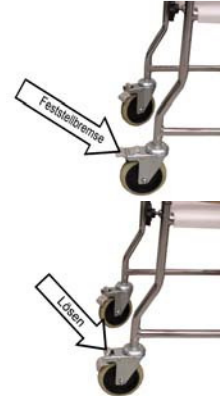

Hochklappen der Fußstützen

Um das Einsteigen zu erleichtern, können die Fußstützen nach außen geschwenkt werden
Betätigen Sie dazu zuerst die Feststellbremsen
Klappen Sie nun die Fußstützen ,wie in der Abbildung dargestellt, hoch



Wegschwenken der Fußstützen

Um das Einsteigen zu erleichtern, können die Fußstützen nach außen geschwenkt werden
Betätigen Sie dazu zuerst die Feststellbremsen
Betätigen Sie nun den Hebel wie in der Abbildung dargestellt
Nun kann die Fußstütze um 90° nach außen gedreht werden.
Um Sie wieder in die Ausgangsposition zu bringen, einfach um 90° zur Mitte schwenken



Wegklappen der Armlehnen

Betätigen Sie zuerst die Feststellbremsen
Ziehen Sie den Hebel an den Armlehnen zu sich, so wie auf der Abbildung dargestellt
Nun können Sie die Armlehne nach unten schwenken
Um diese wieder zu montieren gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor
Vergewissern Sie sich, dass der Hebel wieder hörbar eingerastet ist



Abnehmen der Fußstützen

Betätigen Sie dazu zuerst die Feststellbremsen
Betätigen Sie nun den Hebel wie beim Wegschwenken der Fußstütze. Nun kann die Fußstütze um 90° nach außen gedreht werden, um Sie danach in Pfeilrichtung aus ihrer Verankerung zu ziehen



Ein- und Aussteigen von Vorn

Betätigen Sie zuerst die Feststellbremsen
Die Beinstütze kann zum leichteren Ein- und Aussteigen einfach nach hinten geschwenkt werden (siehe Abschnitt **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** Wegschwenken der Fußstützen)
Sobald Sie sicher Platz genommen haben bringen Sie die Fußstützen in die normale Position



Ein- und Aussteigen von der Seite

Betätigen Sie zuerst die Feststellbremsen
Die Armlehnen können zum leichteren Ein- und Aussteigen einfach nach unten geschwenkt werden wie in Abschnitt **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** beschrieben
Sobald Sie wieder sicher Platz genommen haben, bringen Sie die Armlehnen wieder in die Ausgangsposition



Benutzung als Toilettenstuhl

Betätigen Sie zuerst die Feststellbremsen
Zur Benutzung als Toilettenstuhl schieben Sie den Eimer ohne Deckel von hinten entlang der Führung unter den Sitz
Entfernen Sie die Hygieneabdeckung
Entfernen Sie den Eimer nach der Benutzung und verschließen Sie ihn mit dem Deckel



Nach der Benutzung

Entfernen Sie den Toiletteneimer erst nachdem die Person nicht mehr auf dem Toilettenstuhl sitzt, sonst besteht Klemmgefahr.
Legen Sie den Deckel auf
Reinigen Sie anschließend das Produkt mit allen erforderlichen Maßnahmen

Reinigung

Der Toilettenstuhl sollte nach jeder Benutzung gereinigt werden. Die Desinfektion sollte nach jedem Toilettengang erfolgen. Die Rahmenteile können mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Die Räder können mit einer feuchten Bürste mit Kunststoffborsten gereinigt werden (Achtung! Keine Drahtbürste verwenden) Zur Desinfektion verwenden Sie ein handelsübliches Flächenreinigungsmittel.

Garantie

Die Gewährleistung entspricht den gesetzlich vorgeschriebenen 24 Monaten ab Kaufdatum. Garantieleistungen beinhalten Mängel des Produktes, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Ausgeschlossen aus der Gewährleistungspflicht sind Beschädigungen, die durch natürlichen Verschleiß, durch Vorsatz, fahrlässige bzw. unsachgemäße Bedienung oder Benutzung entstanden sind. Die Garantie entfällt außerdem bei Verwendung von ungeeigneten Reinigungsmitteln, Schmierölen bzw. Fetten.

Wartung

Der Toilettenstuhl ist weitestgehend wartungsfrei konzipiert. Falls eine Instandsetzung erforderlich sein sollte, lassen Sie diese nur von Ihrem Fachhändler durchführen.

Maßnahme	täglich	monatlich	jährlich	Bemerkungen
Radlager ölen			X	Durch Fachhandel
Bremsen kontrollieren	X	X	X	Durch Benutzer und Fachhandel
Unversehrtheit der Polsterung		X	X	Durch Benutzer und Fachhandel
Unversehrtheit der Rahmenteile		X	X	Durch Benutzer und Fachhandel
Unversehrtheit der Verbindungen		X	X	Durch Benutzer und Fachhandel

Auf Anfrage des Fachhandels, lassen wir Ihnen gerne weitere Unterlagen für Reparaturen und Instandsetzung zu kommen.

Toilettenstuhl	TSF
Bereifung	4 x 5" Rollen
Material	Stahlrohrrahmen Kunstleder, ABS
Farbe	Anthrazit
Sitzbreite (cm)	44
Sitztiefe (cm)	41
Sitzhöhe (cm)	50
Armlehnenhöhe (cm)	25
Gesamtbreite (cm)	55
Gesamttiefe (cm)	88
Gesamthöhe (cm)	97
Überfahrhöhe-WC (cm)	41
Gewicht (kg)	14,0
Max. Belastbarkeit (kg)	120

TRENDMOBIL GmbH

Fohling 24

33106 Paderborn Deutschland

Telefon.: +49 (0) 5254-9479-200

Telefax: +49 (0) 5254-9479-299

E-Mail: info@trendmobil.com Internet:

www.trendmobil.com



Ihr Fachhändler: